



FICHA TÉCNICA VENDA **SUREPRESS**

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 650947

Descripción: Vendaje de Alta compresión, ha sido diseñado para ser utilizado para pacientes con retorno venoso deteriorado. Está Compuesto de Algodón/ Viscosa, nylon y lycra con una línea central amarilla y dos indicadores de extensión rectangulares para extremidades inferiores de diferentes tamaños. Venda lavable y reutilizable.

CARACTERÍSTICAS:

- Indicado para terapia compresiva en tratamiento de úlceras venosas y linfoedemas con ITB 0.8-1.0.
- Guía Visual con indicador central (línea amarilla):que permite el posicionamiento de la venda en 50% para cada vuelta siguiendo la técnica de aplicación espiral.
- Facilidad de aplicación: La cual garantiza la compresión adecuada mediante el uso del indicador de tensión rectangular a cuadrado de acuerdo a la medición del diámetro del perímetro del tobillo (normal/grande)
- Reutilizable: Su composición le permite ser reutilizado (lavado) hasta 20 veces manteniendo su elasticidad

RECOMENDACIONES DE USO

- Se utiliza en pacientes con alteraciones del retorno venoso: ITB 0.8-1.0
- Se aplica sobre apósito primario o secundario, según cantidad de exudado y apósito.
- Determinar el perímetro del tobillo con cinta métrica.
 - *18 a 26 cms: Utilizar rectángulo pequeño, que se transforma en cuadrado al tensionar la venda.
 - *Superior a 26 cms: Utilizar rectángulo Grande, que se transforma en cuadrado al tensionar la venda.
- El vendaje se comienza a instalar desde borde inferior de la zona metatarsiana de la región plantar con el extremo inferior de la venda, siguiendo la base de los dedos de los pies, luego subir a talón con técnica de 8, cubriéndolo completamente.
- Desde Tobillo se comienza a estirar la venda de acuerdo al perímetro del tobillo (rectángulo pequeño o grande) y subir en forma de espiral superponiendo la venda un 50% de su anchura en cada vuelta. Al llegar justo debajo de la rodilla, se puede cortar la venda sobrante y fijar.
- Venda lavable y reutilizable (leer instrucciones de lavado de venda disponible dentro del empaque del producto)

COMPOSICIÓN

- Vendaje elástico de algodón / con viscosa 50/50 (53% nylon 21.4) Lycra ,poliuretano,elastano 25.6%.

NOTAS ADICIONALES

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.
- Puede utilizarse como apósito primario o secundario.



CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

- Furtado. K.Pina, E.Albino, A.Boas practicas no tratamiento y prevención de Úlceras de pierna de origen venoso.Gaif, 2017

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 650947