

FICHA TÉCNICA POLVO STOMAHESIVE

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 25510

Descripción: Polvo de hidrocoloide para tratamiento de piel irritada de la zona periestomal o piel por contacto con fluidos corrosivos, como corresponden a casos de dermatitis húmedas. Constituido por gelatina, pectina, y carboximetilcelulosa sódica.

CARACTERÍSTICAS:

- Polvo de hidrocoloide para tratamiento de dermatitis húmeda, tales como periestomal y/o asociada a incontinencia.
- Las sustancias naturales hidrocoloide del Polvo Stomahesive tiene la capacidad de absorber la humedad presente en la superficie de la piel excoriada o irritada, permitiendo la fácil adhesión de la barrera protectora de piel. La tecnología del hidrocoloide ha demostrado tener una gran capacidad para regenerar el tejido dañado.

RECOMENDACIONES DE USO

- Limpiar la piel, secar.
- Espolvorear polvo stomahesive y retirar exceso.
- Colocar sistema de recolección indicado.
- NO aplicar sobre heridas abiertas o úlceras.
- Se sugiere para mejor resolución y sello del producto, que luego de aplicar polvo stomahesive, aplicar Sensicare Barrera protectora en spray. Luego dejar secar y colocar el sistema de recolección.

COMPOSICIÓN

- Carboximetilcelulosa sódica, Pectina y Gelatina.

NOTAS ADICIONALES



CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

Iso 13485

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 25510