



FICHA TÉCNICA PLACA NATURA BARRERA FLEXIBLE

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 125262 | 125263 | 125264 | 125265 | 125266

Descripción: Placa recortable flexible de ostomía con disco de protección cutáneo hidrocoloide Stomahesive y con borde adhesivo microporoso flexible e hipoalergénico opaco, aro de acople central flexible para acople con bolsas Natura Recortable.

CARACTERÍSTICAS:

- **Protección de la Piel:** Las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada. La placa protectora de piel Stomahesive® se adhiere a la piel seca.
- **Adhesión seco a Húmedo:** Absorben la humedad manteniendo la piel íntegra y protegida.
Multimedidas: Recortable y adaptable a diferentes tamaños de estoma.
- **Discreción:** Borde adhesivo microporoso. Color piel para mayor discreción.

RECOMENDACIONES DE USO

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.
- Mida el estoma con la guía proporcionada. Limpie suavemente el área con agua y séquela suavemente, sin frotar.
- Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave.
- La piel periestomal debe estar libre de disolventes o sustancias grasosas se recomienda utilizar barrera protectora.
- Trace el tamaño del estoma en el papel blanco posterior, centrándose alrededor del orificio inicial.
- Ampliar el orificio de la placa protectora Stomahesive® recortándolo según el tamaño del estoma. Para su remoción plicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad.

COMPOSICIÓN

- Barrera cutánea Stomahesive® : Constituida en su parte central por Carboximetil Celulosa Sódica, pectina, gelatina, poli-isobutileno con soporte adhesivo hipoalergénico.



NOTAS ADICIONALES

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.
- Tamaños (en mm): [32 | 38 | 45 | 57 | 70]

CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 125262 | 125263 | 125264 | 125265 | 125266