



FICHA TÉCNICA PLACA ACTIVE LIFE® ADULTO

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 22771 | 125371

Descripción: Sistema colector de una pieza para efluente de ostomías digestivas: ileostomías y colostomías, con barrera de protección cutánea Stomahesive®, con bolsa drenable. Recortable a diferentes tamaños.

CARACTERÍSTICAS:

- Las sustancias hidrocoloides de su barrera cutánea absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada.
- La barrera protectora de piel Stomahesive® se adhiere a la piel y absorbe la humedad manteniendo la piel íntegra y protegida
- Recortable (19 - 64mm) y adaptable a diferentes tamaños de estomas

RECOMENDACIONES DE USO

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.
- Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante
- Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave.
- Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área periestomal
- Retirar el antiadherente sobre el disco
- Coloque el sistema completo sobre el cuerpo. Aplicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad previo a colocar el sistema.
- Presione/sostenga la barrera a la piel en su lugar durante aproximadamente 30 segundos asegurando una correcta adhesión, luego retire protección de adhesivo microporoso.
- Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa.

COMPOSICIÓN

- Barrera Protectora de Piel Stomahesive®:
- Carboximetilcelulosa sódica, pectina, gelatina, polí-isobutileno, suspendidos en una película de polietileno.
- Bolsa Recolectora: Plástico PVC y panel poroso protector en su cara posterior.

NOTAS ADICIONALES

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.



CERTIFICACIÓN Y REGISTROS:

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 22771 | 125371