



# FICHA TÉCNICA CINTURÓN PARA DISPOSITIVO DE OSTOMÍA

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 175507

**Descripción:** El cinturón es un accesorio para sostener las bolsas del sistema de ostomía. Se recomienda para personas activas, deportistas o quienes requieren mayor seguridad para llevar las bolsas de ostomía.

## CARACTERÍSTICAS:

- —También es recomendado para aquellas personas con estomas planos o retraídos, ya que permite que el estoma sobresalga un poco más sobre la piel. En este caso se debe asociar al uso de placas convexas.
- –Complemento de uso de sistemas recolectores, ostomias convexo.
- –Ajustable: Contiene dos broches plásticos en sus extremos que permite ajustarlos a las bolsas ConvaTec.
- –Multimedidas: Se puede ajustar al contorno del abdomen del paciente y permite graduarlo según necesidad.
- Resistencia: El elástico es muy resistente y se puede lavar. Es hipoalergénico.
- —Comodidad y Seguridad: Se ajusta perfectamente a las aletas laterales de las bolsas ConvaTec, evitando que la bolsa se caiga, brindando así mayor seguridad y ajuste.

## RECOMENDACIONES DE USO

- -Para colocar el cinturón se recomienda:
- —Colocar el cinturón de tal manera que la hebilla de graduación quede hacia fuera para que no haga presión sobre la piel.
- –Ajustar el cinturón al contorno del abdomen del paciente de tal manera que no quede ni muy suelto ni muy ajustado.
- –Los broches plásticos de los extremos del cinturón deben quedar bien ajustados sobre las aletas de las bolsas ConvaTec que la poseen

# COMPOSICIÓN

-El cinturón está fabricado en Nylon Blanco elástico con 100% de -algodón y cosido con poliéster. Los ajustes triangulares y la hebilla -para ajustar el largo del cinturón están fabricados en nylon blanco.

## NOTAS ADICIONALES

-Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.



**CERTIFICACIÓN Y REGISTROS** 

ortopedia\_suizacl

f Ortopedia Suiza

