



FICHA TÉCNICA DUODERM CGF BORDER

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 187973 | 187974

Descripción: El apósito estéril Duoderm CGF con fórmula de Gel Controlada y reborde, es un apósito adhesivo para el contacto con el exudado de la herida formando una masa suave que permite retirar el apósito sin lesionar los tejidos en formación.

CARACTERÍSTICAS:

- **Apósito Oclusivo:** es impermeable a los líquidos, gases, y microorganismos incluidos virus del Sida y Hepatitis, reduciendo los riesgos de invasión bacteriana y viral. Retiene el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización. Mantiene el pH ligeramente ácido (5.0-6.0): reduce los riesgos de infección por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano.
- **Favorece el Desbridamiento Autolítico:** mantiene la humedad en el lecho de la herida favoreciendo la acción de las enzimas endógenas para la remoción natural del tejido necrótico.
- **Absorción de Exudado:** las sustancias hidrocoloides tienen capacidad de absorber y controlar el exudado permitiendo cambios de apósito entre 2 y máximo 7 días. Impermeable a los Líquidos: reduce los riesgos de contaminación de la lesión en pacientes con incontinencia y mejora la calidad de vida del paciente ya que permite realizar el baño general en ducha sin necesidad de un recubrimiento adicional.

RECOMENDACIONES DE USO

- **Úlceras y heridas con exudado moderado.** Lesiones por Presión, úlceras vasculares de extremidades inferiores (venosas, arteriales, diabéticas) quemaduras (primer y segundo grado), heridas quirúrgicas, heridas traumáticas, zonas dadoras de injertos.
- Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante.
- Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas
- Secar bien la piel perilesional para asegurar la adhesividad del apósito a la piel sana. Extraer apósito del envase estéril.
- Elegir un tamaño de apósito que sobrepase por lo menos 3 cm, el tamaño de la lesión.
- Cambiar el apósito cuando se filtre por alguno de sus bordes.
- Promedio de duración 2 a 7 días.

COMPOSICIÓN

- Masa Adhesiva con hidrocoloides (Gelatina, Carboximetilcelulosa de sodio, Pectina, Poliisobutileno LMMH, Caucho de Butilo, caucho de Estireno_Isopreno- Estireno, tetrakis, Ester de Pentaeritritol Rosina A, Aceite Mineral).
- Capa de Espuma de poliuretano con una película de Poliuretano.
- Papel de Liberación en Silicona.
- Lengüeta en Poliéster.



NOTAS ADICIONALES

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 187973 | 187974