



# FICHA TÉCNICA PLACA **ACTIVE LIFE® ADULTO ALTERN.**

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 400394

**Descripción:** El sistema de una bolsa drenable de Ostomía Active Life® consiste de una barrera protectora de piel Stomahesive® junto con una bolsa drenable, los cuales forman una sola pieza para la recolección de efluentes. Recomendado para cambios frecuentes.

## **CARACTERÍSTICAS:**

Las sustancias hidrocoloides de su barrera cutánea absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada.

La barrera protectora de piel Stomahesive® se adhiere a la piel y absorbe la humedad manteniendo la piel íntegra y protegida - Recortable de 19 - 64mm y adaptable a diferentes tamaños de estomas

## **RECOMENDACIONES DE USO**

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.
- Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante
- Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave.
- Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área periestomal
- Retirar el antiadherente sobre el disco
- Coloque el sistema completo sobre el cuerpo. Aplicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad previa para colocar el sistema.
- Presione/sostenga la barrera de la piel en su lugar durante aproximadamente 30 segundos asegurando una correcta adhesión, luego retire protección de adhesivo microporoso.
- Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa.

## **COMPOSICIÓN**

- Carboximetilcelulosa de Sodio, Gelatina, Pectina, Poliisobutileno,
- Escudo protector de la barrera en PVC, Etiqueta con guía de corte,
- Película Five Ply,
- Material de Respaldo Polietileno, Laminado en Polietileno, Papel de liberación en Silicona, Soporte en Polietileno no tejido con acrílico adhesivo.

## **ADICIONALES**

- Bolsa Recolectora Transparente que permite la observación del estoma y el efluente.
- Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa.



## **CERTIFICACIÓN Y REGISTROS:**

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 400394