



FICHA TÉCNICA PLACA NATURA BARRERA CUTÁNEA CONVEXA PRECORTADA

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 413180 | 413181 | 413182 | 413183 | 413185 | 413186

Descripción: Barrera cutánea precortada, con disco de protección cutáneo de hidrocoloide Durahesive, borde adhesivo microporoso flexible y con convexidad de tipo rígida para acople con bolsas Natura.

CARACTERÍSTICAS:

- **Protección de la Piel:** Las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada.
- **Hidrocoloide Durahesive:** Recomendado para estomas con efluentes semilíquidos y líquidos entregando mayor protección para la piel.
- **Convexidad Rígida:** Permite mejor manejo de estomas retraídos y planos.

RECOMENDACIONES DE USO

- **Preparación de la piel:** Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias oleosas o emolientes, se recomienda utilizar barrera protectora.
- **Selección de barrera o placa:** Seleccionar una barrera pre-cortada que sea del tamaño más cercano al diámetro del estoma. NO agrandar más la abertura.
- Retirar el protector del adhesivo e instalar.
- Asegurese de escoger la bolsa Natura del mismo tamaño que el aro de la barrera cutánea.
- **Remoción:** Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera. Si es posible, aplique removedor de adhesivo.
- Se recomienda utilizar con cinturón.

COMPOSICIÓN

- Compuesta de una pestaña natural (LDPE, siglas en inglés de Polietileno de baja densidad), adherido a un disco convexo delgado (etilenvinil acetato). Se posiciona un collar (fibra recubierta de adhesivo hidrocoloide/adhesivo acrílico de fibra de poliéster) sobre el anillo de soporte y posteriormente una pestaña del lado del cuerpo (LDPE con colorante beige), en la parte superior. La pestaña, el collar y el anillo están adheridos entre sí. Una fina capa de liberación removible (poliestireno) cubre totalmente el lado adhesivo de la barrera. Hidrocoloide durahesive



NOTAS ADICIONALES

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES ID: 413180 | 413181 | 413182 | 413183 | 413185 | 413186