



FICHA TÉCNICA BOLSA COLECTORA DE OSTOMIA OPACA Y TRANSPARENTE

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 416416 | 416419 | 416422 | 401515 | 416417 | 416420 | 416423

Descripción: Bolsa recolectora para uso en ostomías, con filtro de carbón que incluye una capa anti-obstrucciones, materiales amables con la piel, sistema de cierre “InvisiClose” y bolsillo de seguridad “Lock-it Pocket” que esconde de manera segura el drenaje de la bolsa, proporcionando el confort de una bolsa cerrada.

CARACTERÍSTICAS:

- **Protección de la piel:** Las bolsas drenables para ostomías Natura están recubiertas con un panel de confort que impide el contacto del plástico con la piel del paciente, reduciendo la probabilidad de irritaciones. También están disponibles en presentaciones transparente y opaca, de acuerdo a la necesidad y preferencia del paciente.
- **Tecnología para control de olores:** Las bolsas drenables emplean un filtro diseñado específicamente para las necesidades de la persona que permite reducir los gases al interior de la bolsa, los olores y ayuda a mantener la bolsa con una apariencia más plana.
- **Sistema de Cierre:** El sistema de cierre sin pinza “InvisiClose” ofrece doble seguridad, facilidad de drenaje, comodidad y limpieza. El diseño de tiras es fácil de abrir y el drenaje más alargado permite un mejor control de flujo y reduce el riesgo de salpicaduras.

RECOMENDACIONES DE USO

- Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, - secas y libres de sustancias grasosas o emolientes.
- Coloque primero la barrera cutánea siguiendo las instrucciones de uso correspondientes.
- Sostenga la pestaña de seguridad sobre la parte delantera de la bolsa
- Doble el drenaje de la bolsa 4 veces (cierre “InvisiClose”) y asegúrese de que las pestañas de cierre se superpongan entre ellas.
- Presione las pestañas de cierre unas sobre otras hasta que estén aseguradas y cuando escuche el “clic” a lo largo del drenaje de la bolsa. Gire el bolsillo de seguridad sobre la parte posterior de la bolsa (cara hacia la piel) y presione el sistema de sellado hasta escuchar el “clic” que asegura que está completamente cerrado.

COMPOSICIÓN

- Lámina de la bolsa: etilenvinil acetato / cloruro de polivinilideno (PVDC por sus siglas en inglés) y colorante (en bolsas opacas);
- panel de confort: fibra de polietileno / polietileno- tereftalato;
- sistema de cierre de la bolsa: tira de adhesivo de poliestireno, cinta de cierre de cremallera: cinta en polipropileno, adhesivo de caucho;
- pestaña: etilenvinil acetato; filtro con membrana médica, protección del filtro en lámina de polietileno.



NOTAS ADICIONALES

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.
- Tamaño aro (en mm): [45 | 57 | 70 | 100]

CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 416416 | 416419 | 416422 | 401515 | 416417 | 416420 | 416423